





Transformisanje industrije implanta

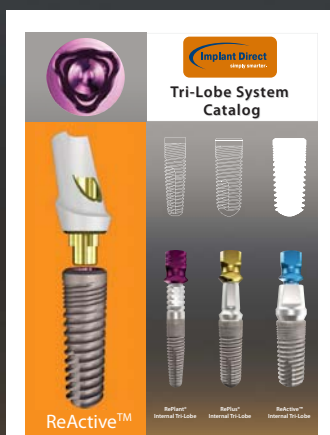


Najšira linija proizvoda
Vrhunski kvalitet – najbolja
vrednost

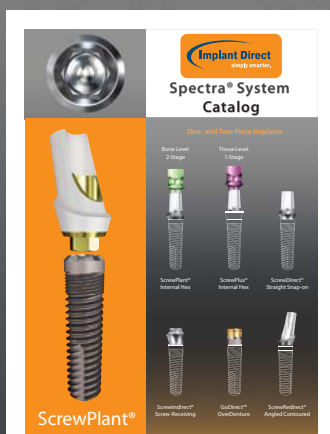

Pregled sistema 2012

Sadržaj

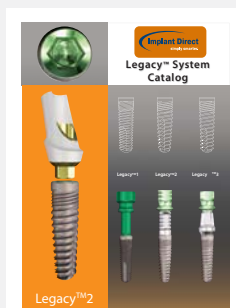

Sistem Legacy™ str. 2-5




Kompatibilan sa
*Zimmer Screw-Vent®



Legacy™1 Legacy™2 Legacy™3

Legacy 3 implanti sa progresivno širim navojima.
Paket sadrži implant sa poklopcem za zarastanje, extender za formiranje gingive, prenosnik i suprastrukturu

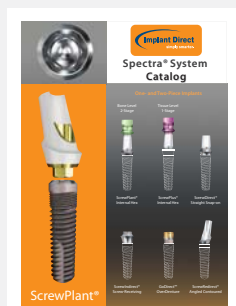


Sistem Spectra® str. 6-9




ScrewPlant® ScrewPlus® ScrewDirect® ScrewIndirect® GoDirect™ ScrewRedirect®

Jednodelni i dvodelni implanti u zavisnosti od primene
sa paketom sve-u-jedan. Telo implanta i hirurški protokoli isti
su za svih šest implanta

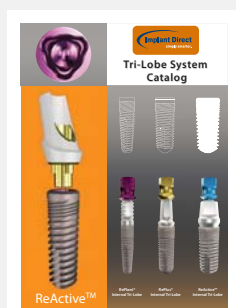

Tri-Lobe str. 10-13

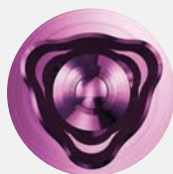


Kompatibilan sa
*Nobel Biocare™



RePlant® RePlus® ReActive™

Paket sadrži implant sa poklopcem za zarastanje,
suprastrukturu i prenosnik.

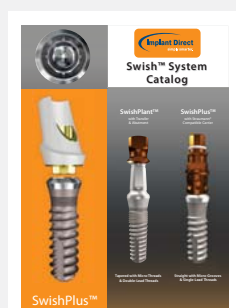

Sistem Swish™ str. 14-17



*kompatibilan sa
*Straumann



SwishPlant™ SwishPlus™

Paket sadrži-implant sa poklopcem za zarastanje,
extender za formiranje gingive, prenosnik i suprastrukturu.

JOŠ BOLJI, ZAJEDNO: Implant Direct Sybron

Spajanje Implant Direct-a i Sybron Implant Solutions-a označava kombinaciju Sybron Dental Solutions-a, kompanije čija je tradicija kvalitet i rad sa kupcima dug sto godina. Implant Direct, doktora Geralda Niznicka je kompanija sa najbržim rastom u industriji implantata. Implant Direct započeo je sa radom 2004. godine, ali njegov razvoj seže od 1982. godine i korporacije Core-Vent, koja je prerasla u kompaniju Paragon Implant pre nego što ju je 2001. kupio Zimmer Dental.

U oktobru 2006, Implant Direct je lansirao prodaju Spectra sistema, implanta za specifične primene, u pakovanju "sve u jednom". Proizvodi su dalje usavršavani u RePlant, Legacy i Swish plant sisteme omogućavajući kompatibilnost sa Nobel Biocare, Zimmer Dental i Straumann sistemima. Implant Direct razvio je prvi jedinstveni tehnološki proces proizvodnje ne paralelne preciznosti i proizvodne efikasnosti u ovoj grani industrije. Njegova tehnologija proizvodnje u kombinaciji sa on-line sistemom naručivanja, omogućuje Implant Direct-u da ponudi stomatolozima i do 70% uštede u poređenju sa šest vodećih kompanija u industriji implanta, stvarajući na taj način prihvatljivu cenu u industriji zubnih implanta.

Nakon uspešnog plasiranja na tržište nove generacije zubnih implanta i protetskih komponenti, uporedo sa brojnim drugim proizvodima koje je razvio, Implant Direct predstavljao je atraktivan proizvod za Sybron Implant Solutions. Ovo spajanje pružilo je priliku Implant Direct-u da proširi liniju svojih proizvoda, i to uključivanjem pretetičkih komponenti Attachments International-a i Sybron-ovih bioloških materijala, uz istovremeno ostavljanje šireg, globalnog utiska, posredstvom Sybron-ove mreže.

Kao rezultat toga, Implant Direct ima preko 100 zaposlenih u regionalnoj prodaji i službama za podršku kupcima, i to samo u Severnoj Americi.

Evropsko predstavništvo u Cirihi podržava veliki broj zaposlenih u direktnoj prodaji u Nemačkoj, Švajcarskoj i Italiji, osim globalne mreže distributera koja pokriva sve kontinente.


Implant Direct je sto procentno posvećen obezbeđivanju kvaliteta, inovacija, usluga i vrednosti stomatolozima i laboratorijskim tehničarima po pristupačnim cenama.

Ovo spajanje će uveriti stomatologe i tehničare da je Implant Direct u potpunosti spreman da ispuni ovu svoju obavezu. Radujemo se sto ćete u Implant Direct-u pronaći Vašu potrebu za dobrim implantološkim rešenjima, kao i što ćemo prevazići Vaša očekivanja u vezi sa uslugom i podrškom.


SBM i HA površine sa 17 godina dokumentovanog kliničkog uspeha

SBM površina nastala je korišćenjem rastvorljivog veštačkog medijuma hidroksilapatitnih (HA) kristala, u svrhu stvaranja hrapave teksture. Implant Direct sarađuje sa istim prodavcem za tretmane površina obloženih sa SBM i HA, sa kojima je sarađivala i kompanija Paragon Implant od 1982. godine, kada su ove studije sprovedene.


Izgled Implant Direct-ovih površina

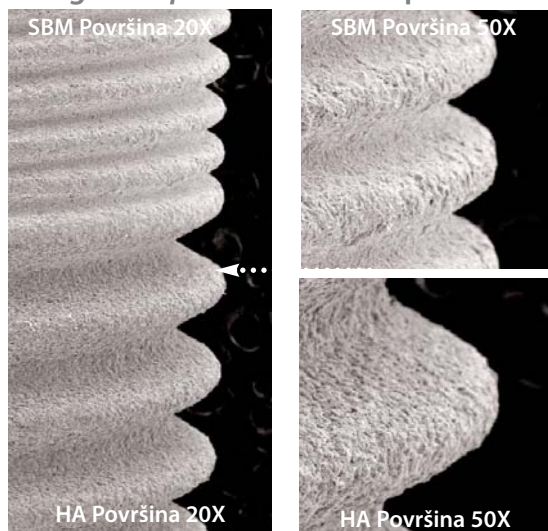

Brazilska studija* pokazuje da SBM obezbeđuje bolji kontakt sa koštanom strukturom

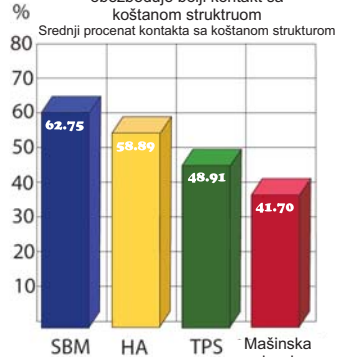

LSU studija* pokazuje da SBM obezbeđuje bolji kontakt sa koštanom strukturom

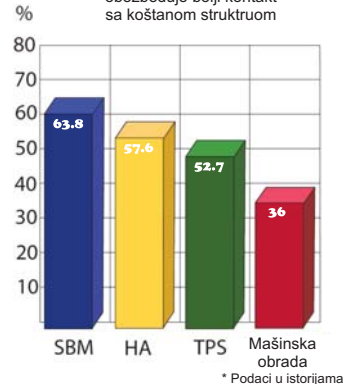

Studije na životinjama – reakcija koštane strukture na SBM površinu





Sistem Legacy™
i protetske opcije




Zimmer Dental
kompatibilan



Implant Legacy™ 1

Kompatibilan sa Zimmer Dental Tapered Screw-Vent sistemom

- **Konekcija:** Unutrašnja šestougaona, kodirana bojom, sa ulaznim zakošenjem
- **Površina:** SBM (rastvorljivi veštački medijum) i HA omotač
- **Hirurški instrumenti:** Spectra® sistem
- **Paket implanta:** implant sa poklopcem za zarastanje, extender za formiranje gingive 2 mm i prenosnik
- **Dužine implanta:** 8/10/11.5/13/16 mm. Ravan šiljak sa 2 rezna žleba na polovini implanta
- **Navoji na implantu:** Mikro-navoji sa dvostrukim ulaznim standardnim „V“ navojima

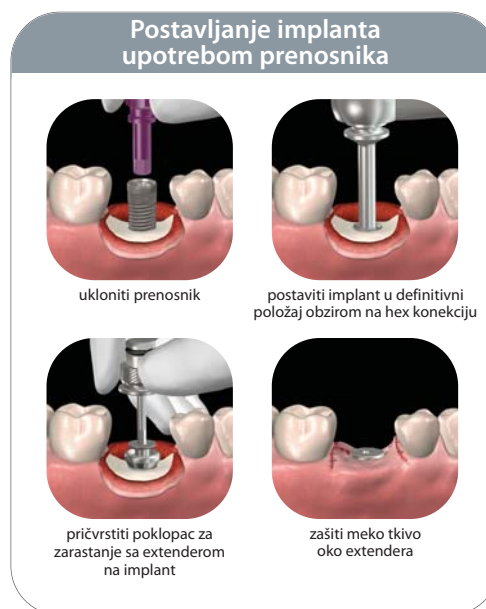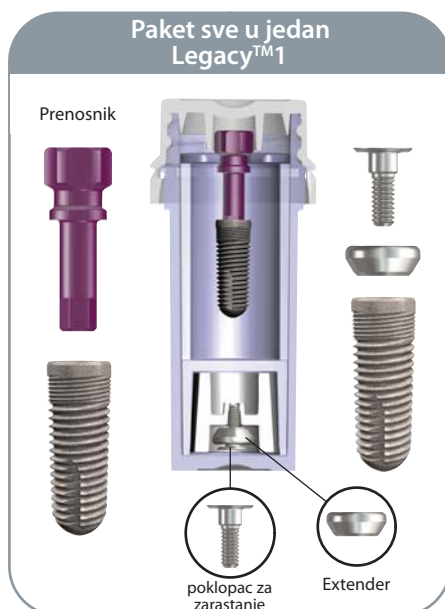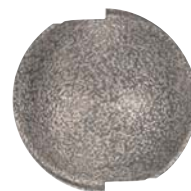






Sistem Legacy™

Implant Legacy™2

Kompatibilan sa Zimmer Dental Tapered Screw - Vent sistemom



- **Konekcija:** Unutrašnja šestougaona, kodirana bojom, sa ulaznim zakošenjem
- **Površina:** SBM (rastvorljivi veštački medijum) i HA omotač
- **Hirurški instrumenti:** Spectra® sistem
- **Paket implanta:** implant sa poklopcem za zarastanje, extender za formiranje gingive 2 mm, prenosnik i privremenu titanijumsku suprastrukturu
- **Dužine implanta:** 8/10/11.5/13/16 mm. 1/3 šiljka je prava, sa zašiljenim delom koji ima 3 rezna žleba
- **Navoji na implantu:** Mikro-navoji sa dvostrukim ulaznim progresivno širim spiralnim navojima

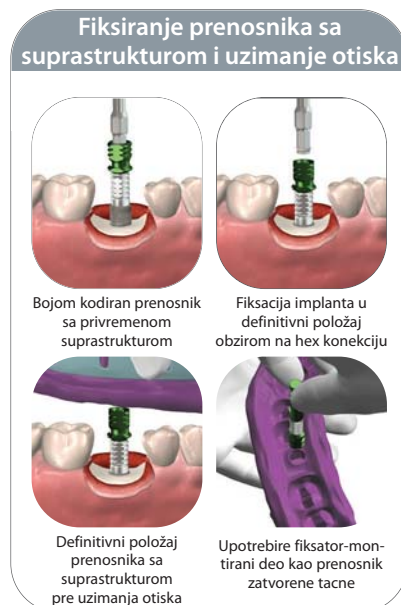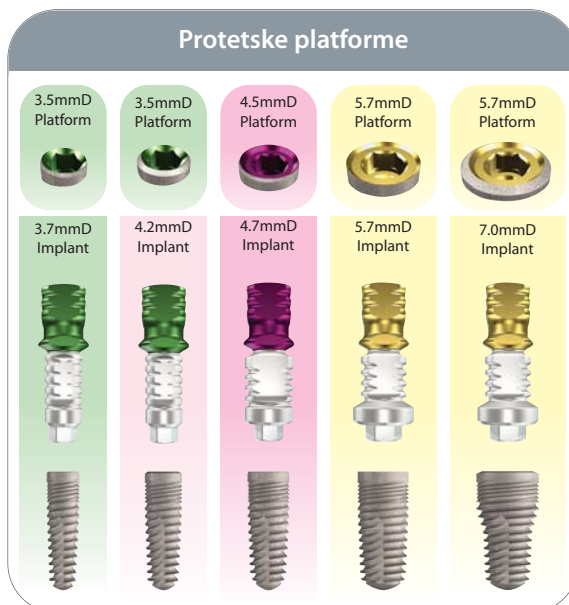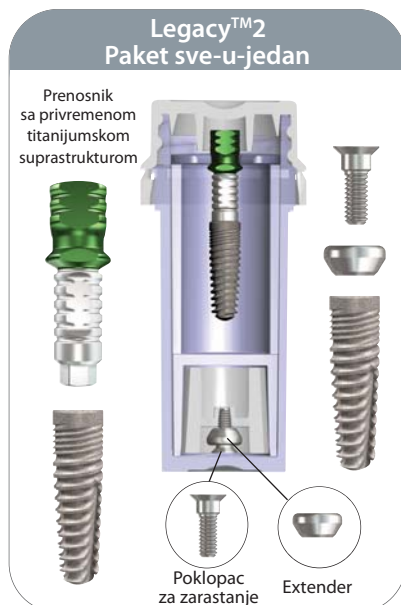

Implant Legacy™3


Compatible with Zimmer Dental Tapered Screw-Vent System

- **Konekcija:** Unutrašnja šestougaona, kodirana bojom, sa ulaznim zakošenjem
- **Površina:** SBM (rastvorljivi veštački medijum) i HA omotač
- **Hirurški instrumenti:** Spectra® Sistem
- **Paket implanta:** implant sa poklopcem za zarastanje, extender za formiranje gingive 2 mm, prenosnik i titanijumsku trajnu suprastrukturu
- **Dužine implanta:** 8/10/11.5/13/16 mm. Ravan šiljak sa 2 rezna žleba na polovini implanta
- **Navoji na implantu:** Mikro-navoji sa dvostrukim ulaznim progresivno širim podupirućim navojima

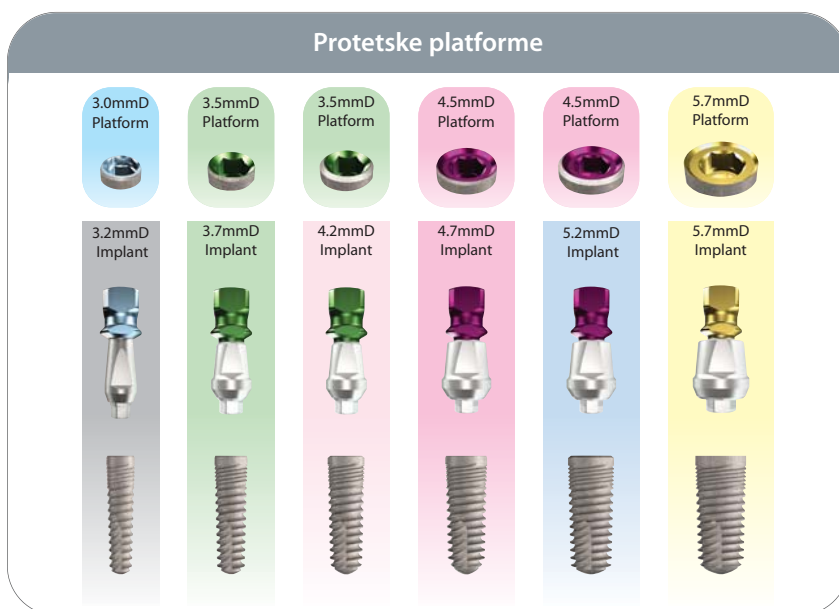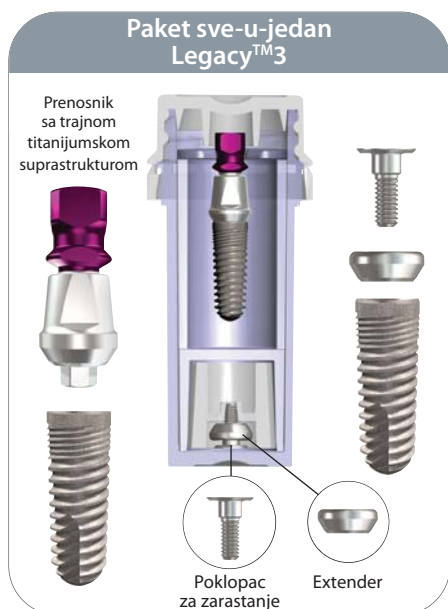



Hirurški set za sistem Spectra®, Legacy™ 1, 2 i 3, RePlus® i ReActive™ implante

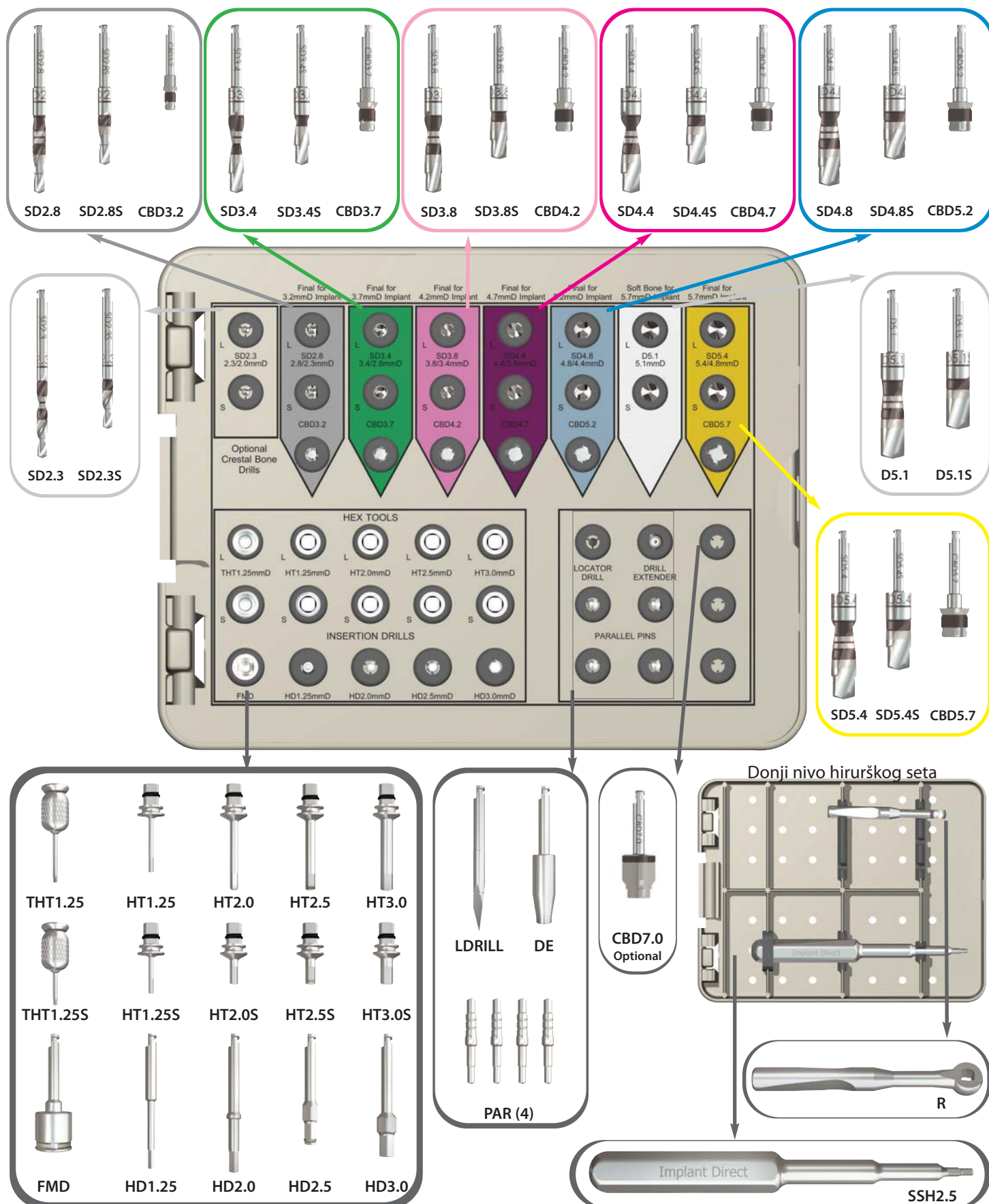



Različita svrdla za sistemSpectra[®], Legacy[™] 1, 2 i 3 RePlus[®] and ReActive[™] implante

3.2 mmD Straight/Tapered Implant

3.0/3.2



Soft Bone Final



SD2.3
2.3/2.0mmD

Dense Bone Final



SD2.8
2.8/2.3mmD

Optional
Bone Contour



CBD3.2

3.7 mmD Straight/Tapered Implant

3.5/3.7



SD2.3
2.3/2.0mmD

Soft Bone Final



SD2.8
2.8/2.3mmD

Dense Bone Final



SD3.4
3.4/2.8mmD

Opciono
Kontura kosti



CBD3.7

3.7 mmD Straight/Tapered Implant

3.5/4.2



Opciono



SD2.3
2.3/2.0mmD



SD2.8
2.8/2.3mmD

Soft Bone Final



SD3.4
3.4/2.8mmD

Dense Bone Final



SD3.8
3.8/3.4mmD

Opciono
Kontura kosti



CBD4.2

4.7 mmD Straight/Tapered Implant

4.5/4.7



Opciono



SD2.3
2.3/2.0mmD



SD2.8
2.8/2.3mmD



SD3.4
3.4/2.8mmD

Meka kost, finalna



SD3.8
3.8/3.4mmD

Gusta kost, finalna



SD4.4
4.4/3.8mmD

Opciono
Kontura kosti



CBD4.7

5.2 mmD Straight/Tapered Implant

4.5/5.2



Opciono



SD2.3
2.3/2.0mmD



SD2.8
2.8/2.3mmD



SD3.4
3.4/2.8mmD



SD3.8
3.8/3.4mmD

Meka kost, finalna



SD4.4
4.4/3.8mmD

Gusta kost, finalna



SD4.8
4.8/4.4mmD

Opciono
Kontura kosti



CBD5.2

5.7 mmD Straight/Tapered Implant

5.7/5.7

5.7/7.0



Opciono



SD2.3
2.3/2.0mmD



SD2.8
2.8/2.3mmD



SD3.4
3.4/2.8mmD



SD3.8
3.8/3.4mmD

Opciono



SD4.4
4.4/3.8mmD



SD4.8
4.8/4.4mmD

Meka kost, finalna



D5.1
5.1mmD

Gusta slika, finalna



SD5.4
5.4/4.8mmD

Opciono
Kontura kosti
za 5.7mmD



CBD5.7

Opciono
Kontura kosti
za 7.0mmD



CBD7.0



Sistem Spectra® i protetske opcije



ScrewPlant®
10



ScrewPlus®
20



ScrewDirect®
30



ScrewIndirect®
40



GoDirect™
42



ScrewRedirect®
50








Sistem Spectra®



ScrewPlant® Implant

- **Konekcija:** Unutrašnja šestougaona (2 mm), sa spoljašnjim ukošenjem
- **Površina:** Presvučena sa SBM (rastvorljivi veštački medijum) ili HA
- **Hirurški instrumenti:** Spectra® Sistem
- **Paket implanta:** implant sa poklopcem za zarastanje, extender za formiranje gingive 2 mm, prenosnik, trajna titanijumska suprastruktura, zaštitna kapica
- **Dužine implanta:** 8/10/11.5/13/16 mm.

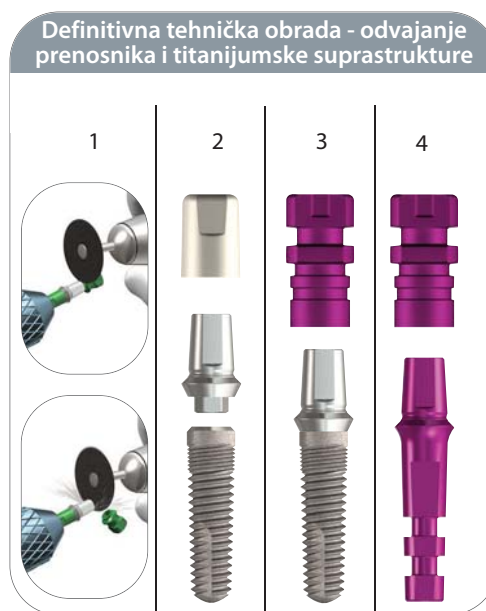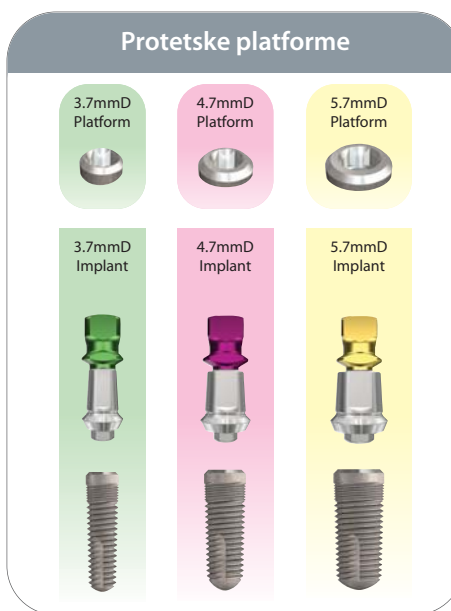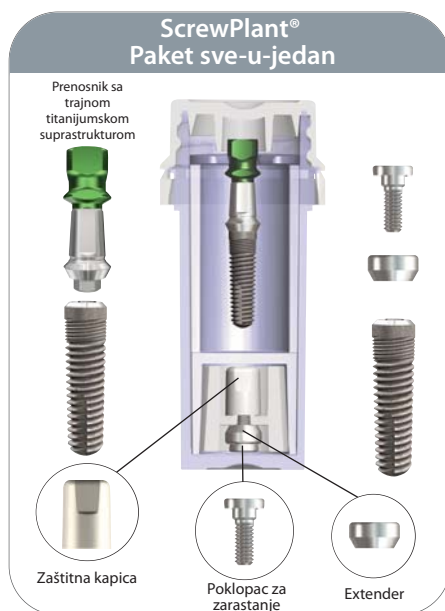

ScrewPlus® Implant

- **Konekcija:** Unutrašnja šestougaona (2 mm), sa spoljašnjim ukošenjem
- **Obod implanta:** 2 mm dužine
- **Površina:** Presvučena sa SBM (rastvorljivi veštački medijum) ili HA
- **Hirurški instrumenti:** Spectra® Sistem
- **Paket implanta:** implant sa poklopcem za zarastanje, extender za formiranje gingive 2 mm, prenosnik, titanijumska trajna suprastruktura, zaštitna kapica
- **Dužine implanta:** 8/10/11.5/13/16 mm.

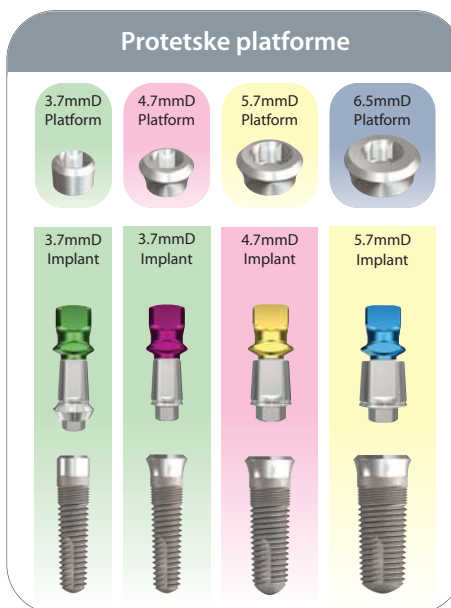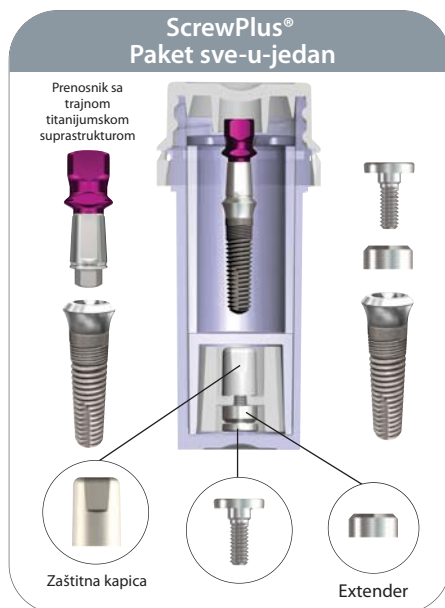




Sistem Spectra®

ScrewDirect® Implant


Jednodelni implant za cementirane protetske radove

- **Konekcija:** Jednodelni implant sa suprastrukturom
- **Obim implanta:** 1.5 mm dužine
- **Površina:** SBM (rastvorljivi veštački medijum)
- **Hirurški instrumenti:** Spectra® Sistem
- **Paket implanta:** implant sa suprastrukturom, prenosnik, zaštitna kapica
- **Dužine implanta:** 10/13/16 mm.


ScrewDirect® Paket sve-u-jedan

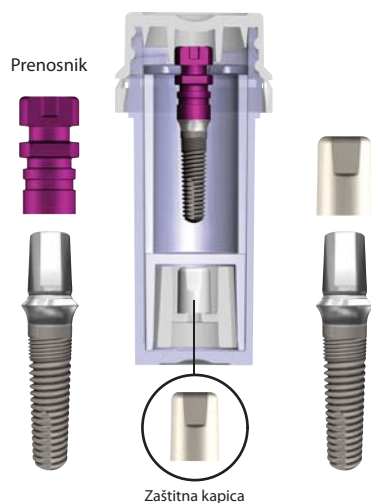

Protetske platforme

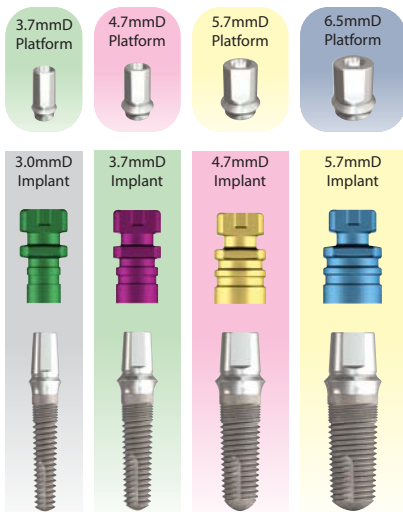

Snap-On zaštitna kapica i transfer

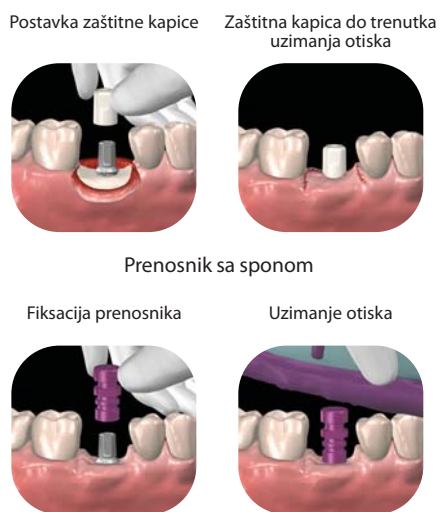


ScrewIndirect® Implant


Jednodelni implant za šrafljene protetske radove

- **Konekcija:** Jednodelni implant sa ravnom suprastrukturom
- **Obod implanta:** 2.5 mm dužine
- **Površina:** SBM (rastvorljivi veštački medijum)
- **Hirurški instrumenti:** Spectra® Sistem
- **Paket implanta:** Implant, extender za formiranje gingive, zaštitnu kapicu i transfer
- **Dužine implantas:** 8/10/13/16mm


ScrewIndirect® Paket sve-u-jedan

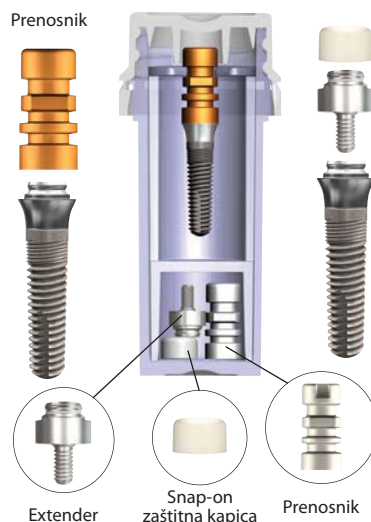

Protetske platforme

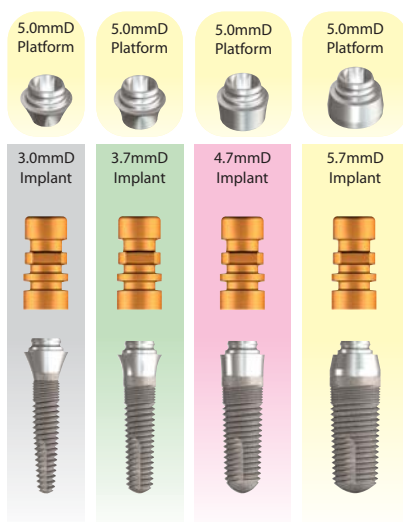

Snap-On zaštitna kapica i prenosnik

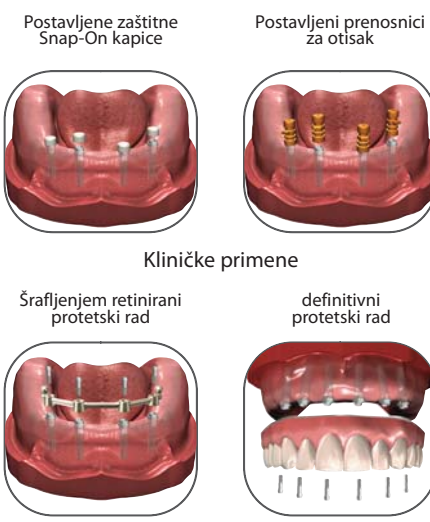



Sistem Spectra®


GoDirect® Implant

- **Konekcija:** Jednodelni implant sa Zest Locator® kompatibilnom platformom
- **Obod implanta:** 1.5 mm i 3.0 mm dužine
- **Površina:** SBM (rastvorljivi veštački medijum)
- **Hirurški instrumenti:** Spectra® Sistem
- **Paket implanta:** Implant sa Locatorom, zaštitna kapica, prenosnik
- **Dužine implanta:** 8/10/11.5/13mm

*Locator® is a registered trademark of Zest Anchors Company. The GoDirect™ and GPS™ Systems are neither authorized, endorsed nor sponsored by Zest Anchors Co.


GoDirect® Paket sve-u-jedan

Prenosnik

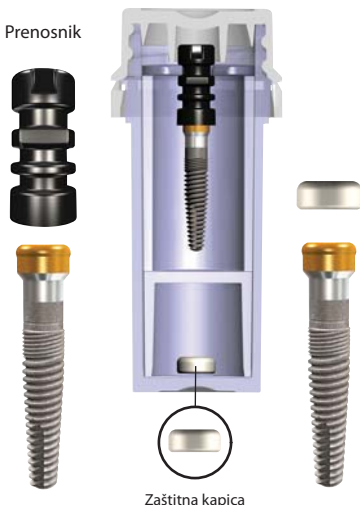

Zaštitna kapica

Protetske platforme

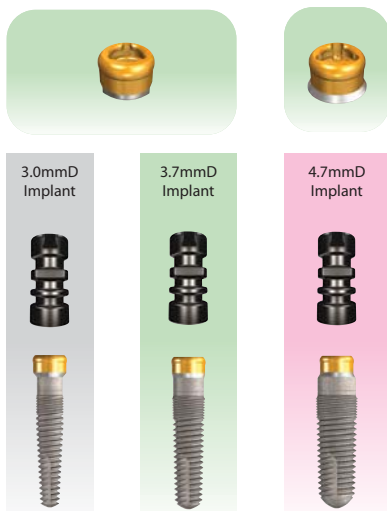

Zaštitna kapica i prenosnik

Fiksirati implant
pomoću prenosnika



Staviti transfer
za uzimanje otiska



Staviti zaštitne
kapice na lokator



Lokatori spremni
za fiksaciju proteze




ScrewRedirect® Implant

Jednodelni implant za frontalnu regiju


- **Konekcija:** Jednodelni implant sa titanijumskom suprastrukturuom pod uglom (12°)
- **Površina:** SBM (rastvorljivi veštački medijum)
- **Hirurški instrumenti:** Spectra® Sistem
- **Paket implanta:** implant sa transferom
- **Dužine implanta:** 13/16mm

ScrewRedirect® Paket sve-u-jedan

Prenosnik

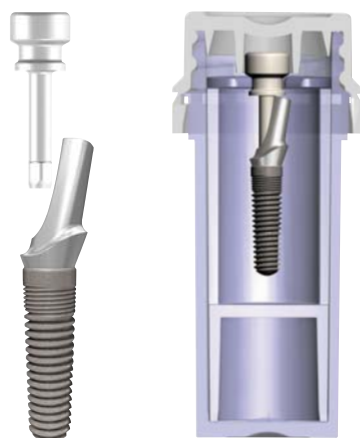

Protetske platforme

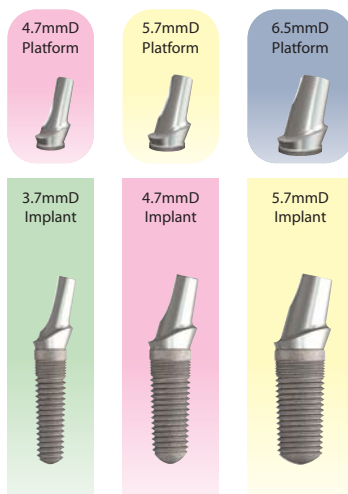

Postavljanje ScrewRedirect® implanta



Nema smetnji ako postoji
zazor od 1 mm



Pojedinačni ulazni navoji za
kontrolu rotiranja



Pripremite prema potrebi



Zavrnite koristeći šestougaoni
instrument od 2 mm



Podesite ugao i konturu



Cementirajte privremeno
bez okluzalnog kontakta



Tri-Lobe
i protetske opcije




NOBEL BIOCARE
KOMPATIBILAN



RePlant® Implant

Hirurški i protetski kompatibilan sa Nobel Biocare-om



- **Konekcija:** Unutrašnja trougaona kodirana bojom, kompatibilno sa Nobel Replace
- **Površina:** SBM (rastvorljivi veštački medijum)
- **Hirurški instrumenti:** RePlant® hirurški set
- **Paket implanta:** Implant sa poklopcem za zarastanje, prenosnik i privremena titanijumska suprastruktura
- **Dužine implanta:** 8/10/11.5/13/16mm

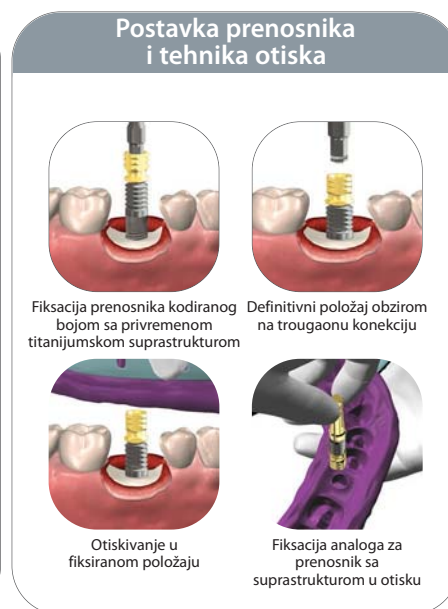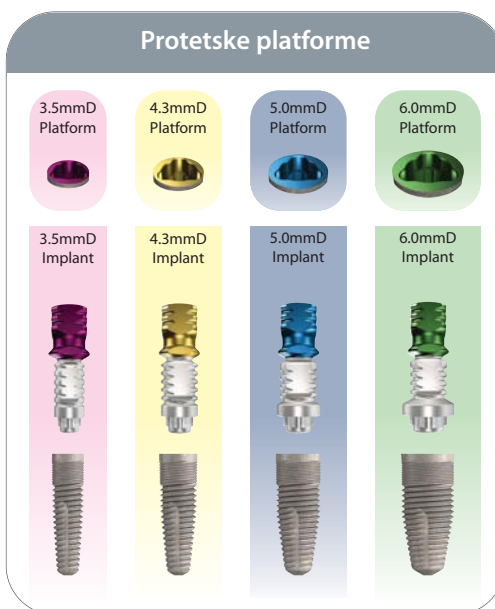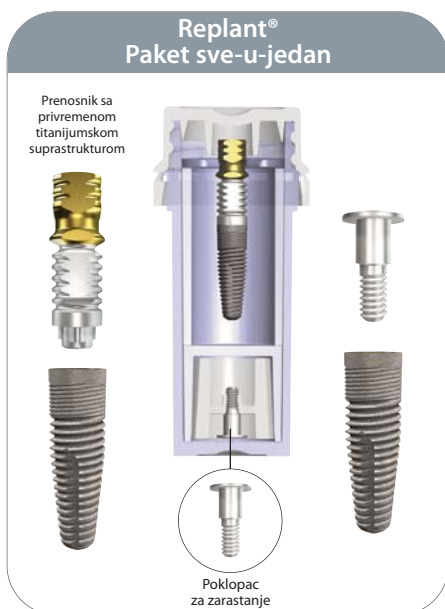

**RePlus® Implant**



Protetski kompatibilan sa Nobel Biocare-om

- **Konekcija:** Unutrašnja trougaona kodirana bojom, kompatibilno sa Nobel Replace
- **Površina:** SBM sa HA površinom
- **Hirurški instrumenti:** Spectra® Sistem
- **Paket implanta:** Implant sa poklopcem za zarastanje, trajna titanijumska suprastruktura, zaštitna kapica i prenosnik
- **Dužine implanta:** 8/10/11.5/13/16mm

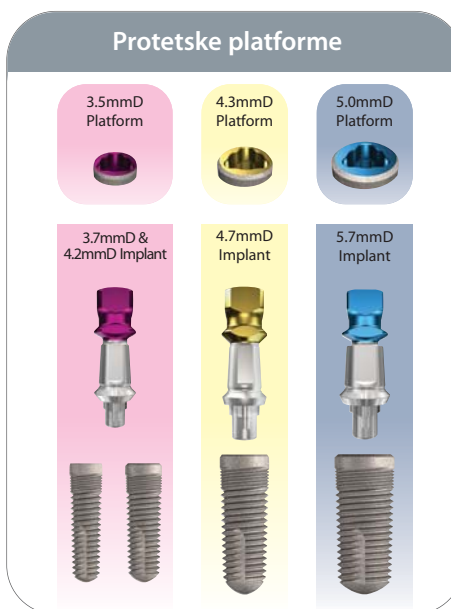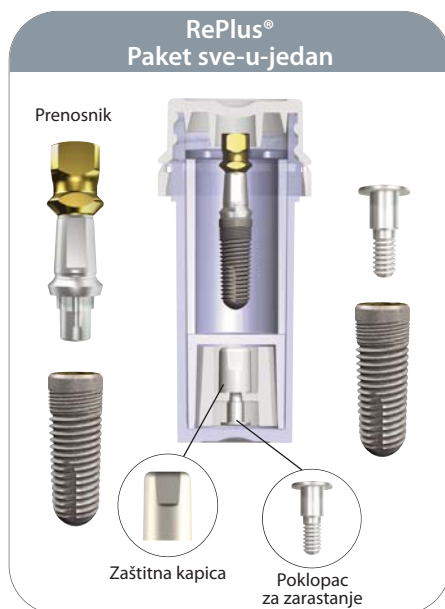**ReActive™ Implant**


Protetski kompatibilan sa Nobel Biocare-om

- **Konekcija:** Unutrašnja trougaona kodirana bojom, kompatibilno sa Nobel Replace
- **Površina:** SBM i HA montač
- **Hirurški instrumenti:** Spectra® Sistem
- **Paket implanta:** Implant sa poklopcem za zarastanje, trajna titanijumska suprastruktura, prenosnik
- **Dužine implanta:** 8/10/11.5/13/16mm

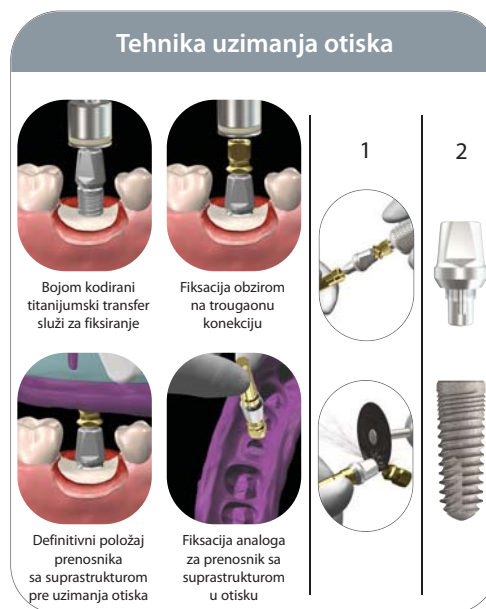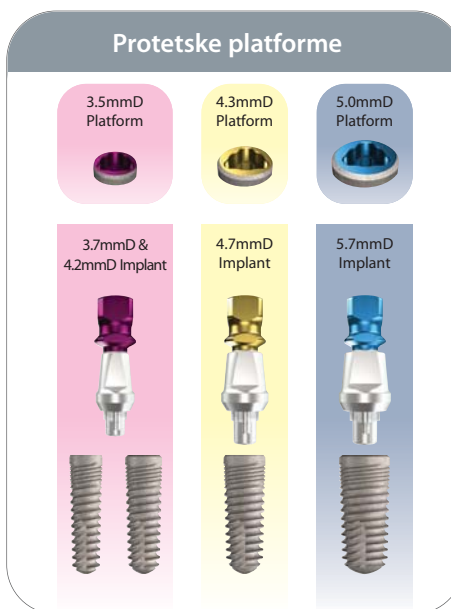



Hirurški set za Tri-Lobe Sistem

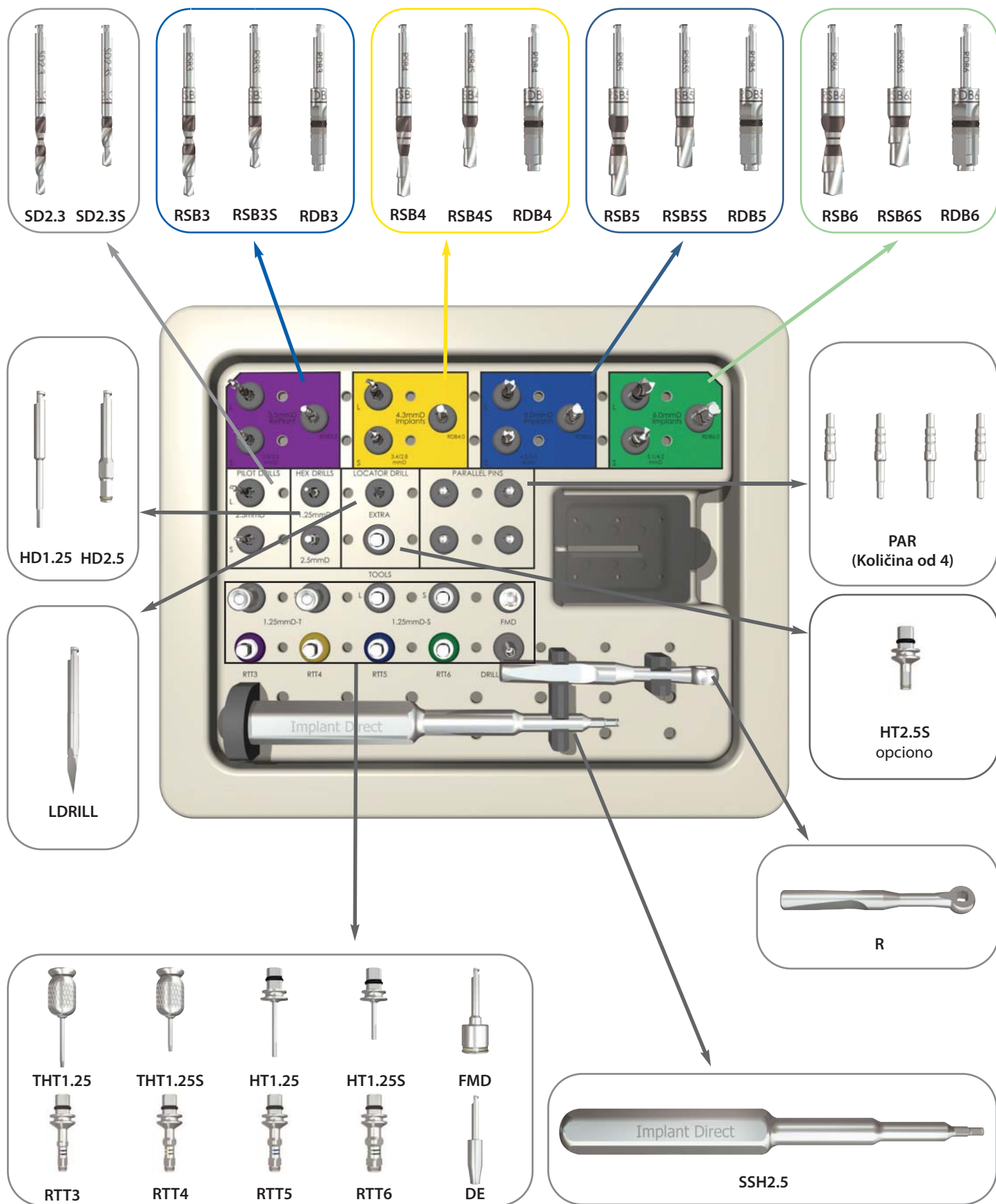



Različita svrdla za Tri-Lobe Sistem

3.5 mmD Straight/Tapered Implant



SD2.3
2.3/2.0mmD

Meka kost finalno



RSB3
2.8/2.3mmD

Gusta kos finalno



RDB3
3.2mmD

4.3 mmD Straight/Tapered Implant



SD2.3
2.3/2.0mmD

Opciono



RSB3
2.8/2.3mmD

Meka kost finalno



RSB4
3.4/2.8mmD

Gusta kos finalno



RDB4
4.0mmD

5.0 mmD Straight/Tapered Implant



SD2.3
2.3/2.0mmD

Opciono



RSB3
2.8/2.3mmD



RSB4
3.4/2.8mmD

Meka kost finalno



RSB5
4.2/3.3mmD

Gusta kos finalno



RDB5
4.7mmD

6.0 mmD Straight/Tapered Implant



SD2.3
2.3/2.0mmD

Opciono



RSB3
2.8/2.3mmD



RSB4
3.4/2.8mmD



RSB5
4.2/3.3mmD

Meka kost finalno



RSB6
5.1/4.2mmD

Gusta kos finalno



RDB6
5.7mmD




Swish™ Sistem protetske opcije

SwishPlus™

- 1 Vrat od 2mm, polu-strukturisan za postavljanje u nivou gingive, estetska postavka
- 2 Mikronavoji obezbeđuju bolju adaptaciju i redukovanje stresa
- 3 Progresivno dublji pojedinačni navoji obezbeđuju svojom površinom potpunu hiruršku kompatibilnost
- 4 Samonarezujući žlebovi- za vodeću inicijalnu stabilnost
- 5 Zašiljen vrh za samonarezivanje

SwishPlant™

- 1 Vrat od 2mm, impregniran za postavljanje u nivou kosti ili gingive
- 2 Mikronavoji obezbeđuju bolju adaptaciju i redukovanje stresa, povećavaju stabilnost
- 3 Progresivni dublji dvostruki navoji obezbeđuju svojom površinom potpunu hiruršku kompatibilnost i brzu inserciju
- 4 Samonarezujući žlebovi- za vodeću inicijalnu stabilnost
- 5 Zašiljeno telo za adaptaciju u mekoj kosti

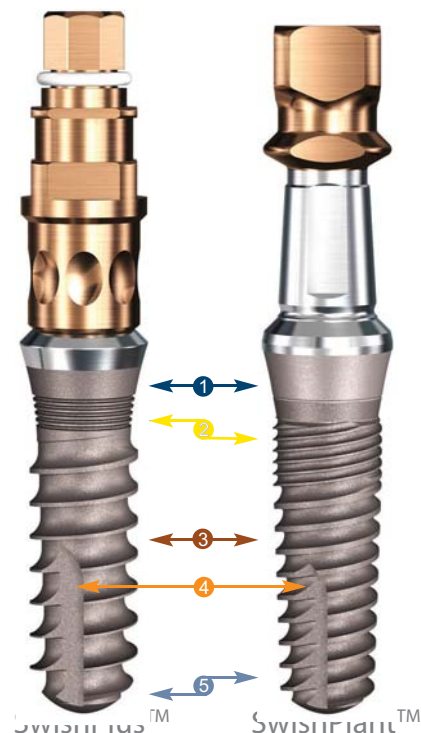

Varijacije sistema: 3,3mm D&5,7mmD SwishPlus™ je zaslijen; 3,3mmD ima SwishPlant™ sa navojima.






Swish™ Sistem

SwishPlus™ Implant

Hirurški i protetski kompatibilan sa Straumann-om




- **Konekcija:** interna octagon, uži prečnik implanta ima internu hex konekciju
- **Površina:** SBM (Soluble Blast Media)
- **Hirurški instrumenti:** Swish™ hirurški set i Straumann hirurški set
- **Pakovanje implanta :** implant, šraf za zarastanje ,extender visine 2 mm i prenosnik
- **Dužine implanta:** 6/8/10/12/14/16mm

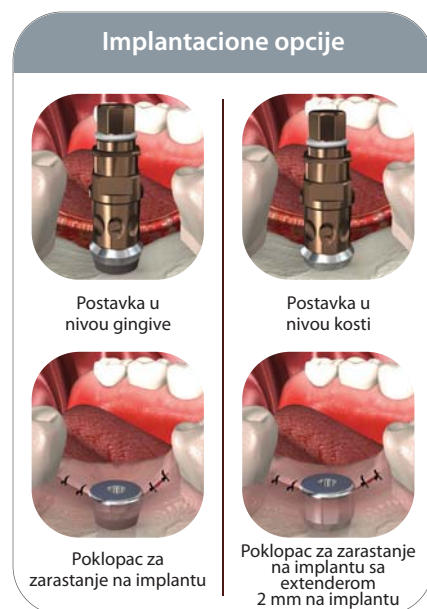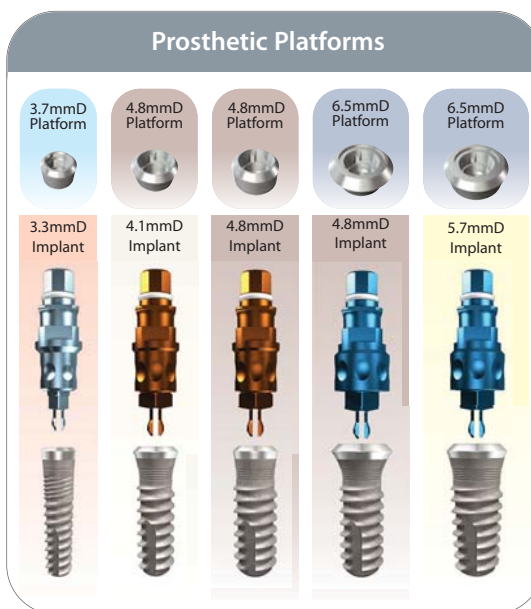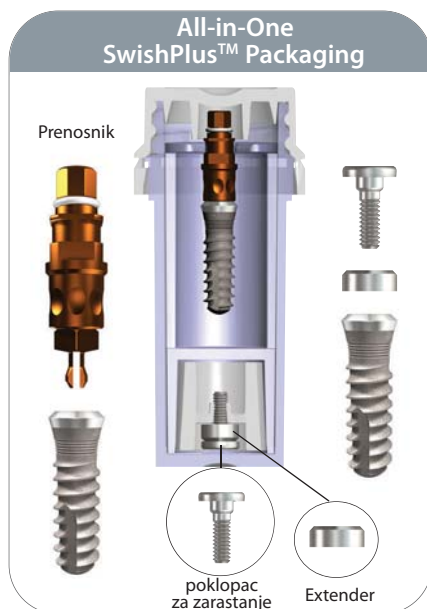

SwishPlant™ Implant

Hirurški i protetski kompatibilan sa Straumann-om

- **Konekcija:** interna octagon, uži prečnik implanta ima internu hex konekciju
- **Površina:** SBM (Soluble Blast Media)
- **Hirurški instrumenti:** Swish™ hirurški set i Straumann hirurški set
- **Pakovanje implanta :** implant, šraf za zarastanje, extender visine 2 mm, privremenu kapicu, prenosnik i titanijumsku trajnu suprastrukturu.
- **Dužine implanta:** 6/8/10/12/14/16mm

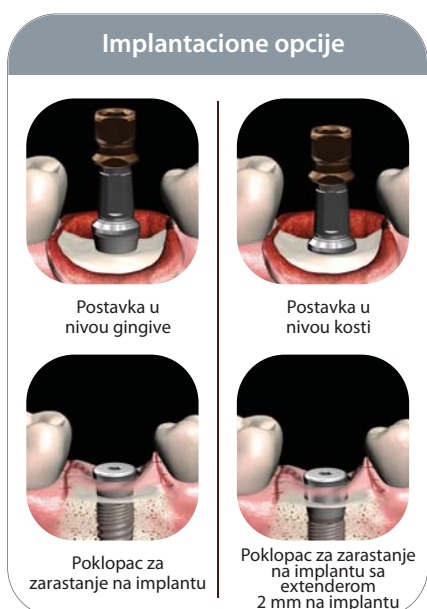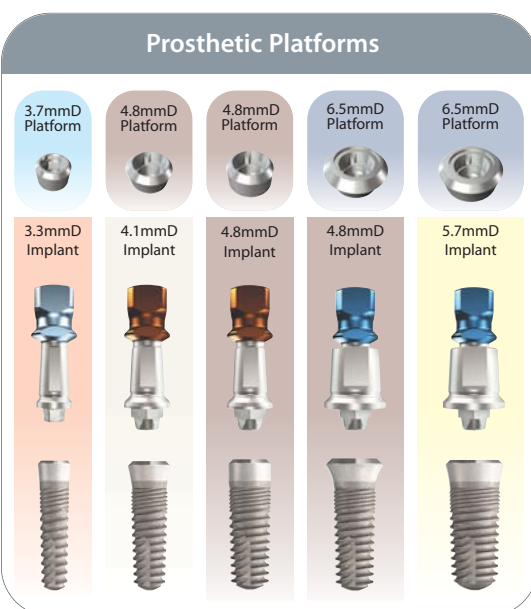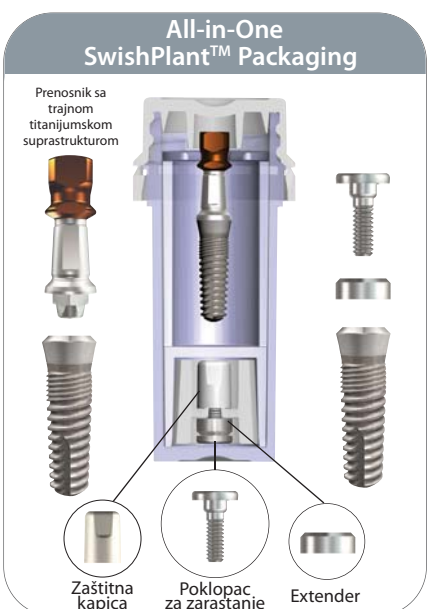

*Excludes 3.3mmD and 5.7mmD
Require crestal bone drills





11000 Beograd
Kontakt tel: 064 643 8164, 064 643 8165
www.mikodental.rs

IKODENTAL
GENERALNI ZASTUPNIK I DISTRIBUTER DENTAL DEPO

15000 Šabac, S. Novaković 19
tel/fax: 00 381 15 345 123, 300 261



Hirurški set za Swish™ Sistem

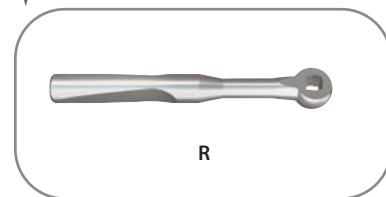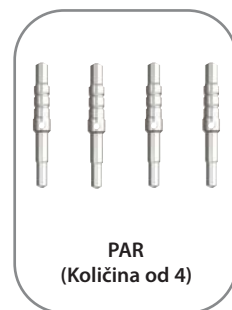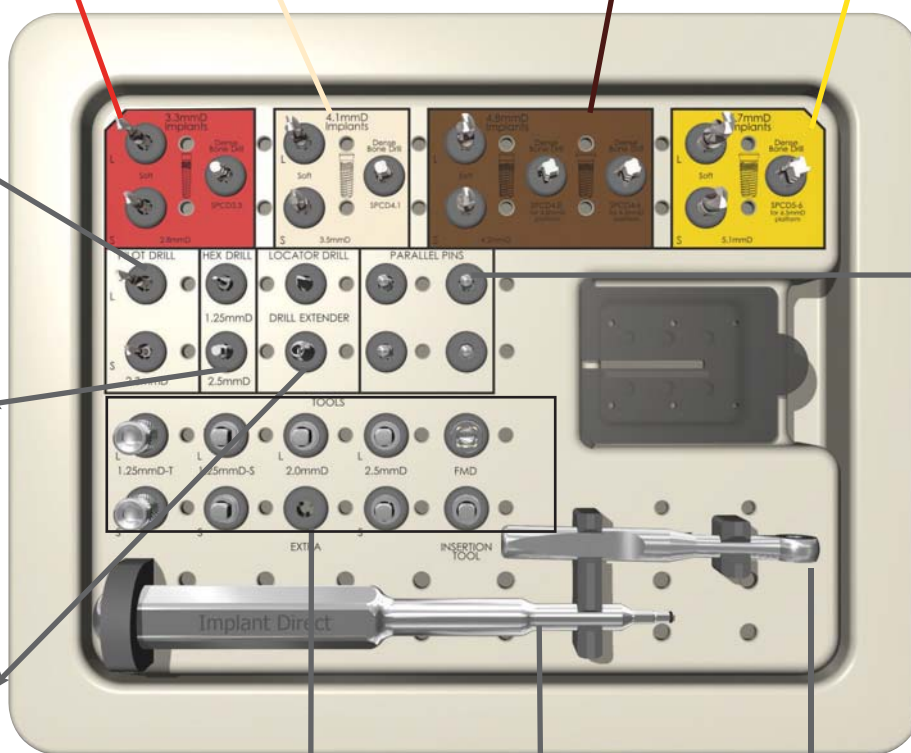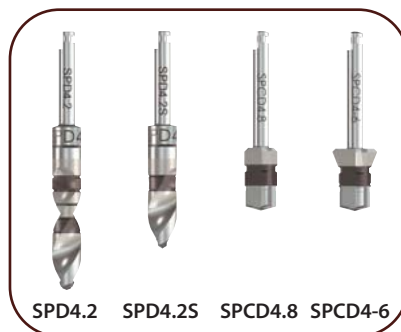



Različita svrdla za Swish™ Sistem

3.3 mmD Straight/Tapered Implant

3.3/3.7



2.3mmD Svrdlo



MEKA KOST
3.3mmD Implant

GUSTA KOST
3.3mmD Implant

SPD2.8



Koristite SPD 2.8 svrdlo kao finalni korak za postavljanje na nivo tkiva ili nivo kosti.

Izbočena kost u maksili će se proširiti bez proširenja za glavu šrafa

Nivo tkiva
FINALNO SVRDLO
SPCD3.3
3.3mmD/3.7mmD

Nivo kosti
FINALNO SVRDLO
SPCD3.3
3.3mmD/3.7mmD

4.1 mmD Straight/Tapered Implant

4.1/4.8



2.3mmD Svrdlo



MEKA KOST
4.1mmD Implant

TVRDA KOST
4.1mmD Implant

SPD2.8



SPD3.5



Koristite SPD 3.5 svrdlo kao finalni korak za postavljanje na nivo tkiva ili nivo kosti.

Izbočena kost u maksili će se proširiti bez proširenja za glavu šrafa

Nivo tkiva
FINALNO SVRDLO
SPCD4.1
4.1mmD/4.8mmD

Nivo kosti
FINALNO SVRDLO
SPCD4.1
4.1mmD/4.8mmD

4.8 mmD Straight/Tapered Implant

4.8/4.8 **4.8/6.5**



2.3mmD Svrdlo



MEKA KOST
4.8mmD Implant

TVRDA KOST
4.8mmD Implant

SPD2.8



SPD3.5



SPD4.2



Koristite SPD 4.2 svrdlo kao finalni korak zapostavljanje na nivo tkiva ili nivo kosti.

Izbočena kost u maksili će se proširiti bez proširenja za glavu šrafa

Koristite SPD 4.2 svrdlo kao finalni korak zapostavljanje na nivo tkiva.

Izbočena kost u maksili će se delimično proširiti, kako bi došlo do pod-izbočenog postavljanja vrata od 1 mm.

Nivo tkiva
FINALNO SVRDLO
SPCD4.8
4.8mmD/4.8mmD

Nivo kosti
FINALNO SVRDLO
SPCD4.8
4.8mmD/4.8mmD

Nivo tkiva
FINALNO SVRDLO
SPCD4-6
4.8mmD/6.5mmD

Nivo kosti
FINALNO SVRDLO
SPCD4-6
4.8mmD/6.5mmD

5.7 mmD Straight/Tapered Implant

5.7/6.5



2.3mmD Svrdlo



MEKA KOST
5.7mmD Implant

TVRDA KOST
5.7mmD Implant

SPD2.8



SPD3.5



SPD4.2



SPD5.1



Koristite SPD 5.1 svrdlo kao finalni korak za postavljanje na nivo tkiva ili nivo kosti.

Izbočena kost u maksili će se proširiti bez proširenja za glavu šrafa

Nivo tkiva
FINALNO SVRDLO
SPCD5-6
5.7mmD/6.5mmD

Nivo kosti
FINALNO SVRDLO
SPCD5-6
5.7mmD/6.5mmD

Note: Tissue-level placement will differ between **SwishPlant™** & **SwishPlus™** with the exception of the 6mmL SwishPlant™ which follows the SwishPlus™ tissue-level protocol. Bone-level placement is the same for both **SwishPlant™** & **SwishPlus™**.

simply smarter

Inovacija i kvalitet po fer cenama!


Implant Direct

100% Fer cena 100% Visok kvalitet
100% Servis 100% Vrednost



Spectra® System

Šest implanata različitih namena

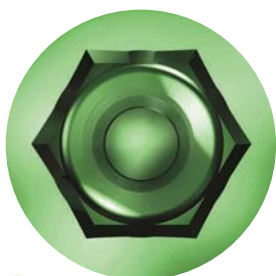


Hexagon



Tri-Lobe




Octagon

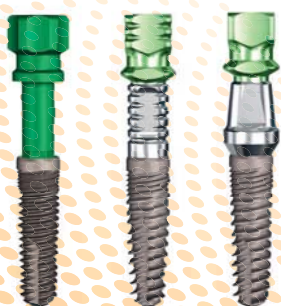

Zimmer Dental*

Legacy™1 Line
Legacy™2 Line
Legacy™3 Line

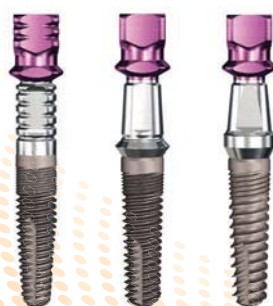

Nobel Biocare™*

RePlant® Line
RePlus® Line
ReActive™ Line



Straumann*

SwishPlus™ Line
SwishPlant™ Line



*Registrovani proizvodi od Zimmer Dental, Nobel Biocare™ and Straumann

www.implantdirect.eu | 00800 4030 4030

