

## Liebe Patientin, lieber Patient,

Sie lassen sich über eine hochwertige Behandlung beraten. Mit dieser Broschüre möchten wir Sie rund um das Thema Knochenerhalt informieren; über die Einsatzgebiete und über unser Produkt GUIDOR easy-graft mit seinen für Sie entscheidenden Eigenschaften.

## Warum ist Knochenerhalt notwendig?

Normalerweise erneuert bzw. regeneriert sich unser Knochen automatisch. Dies passiert aufgrund von funktionellen Reizen (Kauen) oder durch Optimierung der Knochenmasse.

Was aber, wenn wir unfall- oder krankheitsbedingt Zähne verlieren? Dann wird keine Belastung mehr auf den Knochen ausgeübt und er bildet sich zurück. Der Zahnarzt spricht dann von Atrophie oder Knochenverlust.

Für den Knochenschwund können auch Zahnbett-erkrankungen ursächlich verantwortlich sein. Wann immer Knochen schwindet, bedeutet dies für Sie eine ästhetische Beeinträchtigung und in der Folge können geplante Versorgung z. B. durch Implantate nicht realisiert werden, da nicht ausreichend Knochen zur Verfügung steht.

## Warum ist Knochenerhalt für Sie wichtig?

- ✓ Ihr Knochen bleibt stabil.
- ✓ Ihr Zahnfleisch bleibt erhalten.
- ✓ Sie sind flexibler bei weiterführenden Maßnahmen.
- ✓ Sie sparen langfristig Zeit und Geld.



## Wann ist Knochenerhalt sinnvoll und notwendig?\*

### Nach Zahnextraktionen (Socket preservation)

Nach der Zahnentfernung wird kein Reiz mehr auf den Knochen ausgeübt. Als Konsequenz bildet sich der Knochen und damit auch das Zahnfleisch zurück. Ästhetische Beeinträchtigungen und Fehlfunktionen sind die Folge.

Daher ist es wichtig, den Knochen und das Volumen des Weichgewebes von Zahnfleisch und Mundschleimhaut durch den Einsatz von GUIDOR easy-graft langfristig zu erhalten, um nachfolgende Behandlungen durch Implantate, Brücken o.ä. zu ermöglichen.

Ihr Zahnarzt wird mit Ihnen, abgestimmt auf Ihre Indikation, Möglichkeiten zum Erhalt und Aufbau des Knochens und des Gewebes besprechen. Knochenerhaltende Maßnahmen können direkt nach der Entfernung des Zahnes als auch im Vorfeld einer Implantation oder Brückenversorgung durchgeführt werden, um langfristig den Knochen zu erhalten und ein ästhetisches Ergebnis zu erzielen.



Ohne Knochenerhalt



Mit Knochenerhalt

### Was ist GUIDOR easy-graft?

GUIDOR easy-graft ist ein vollkommen synthetisches Knochenaufbaumaterial. Eine Übertragung von Krankheitserregern kann daher ausgeschlossen werden. Es dient als Leitgerüst für den sich neu bildenden Knochen und fördert so die schnelle Verknöcherung des Defektes. Um Ihrem Zahnarzt die größtmögliche Therapiefreiheit zu gewährleisten, bieten wir zwei Varianten an:

### GUIDOR easy-graft CLASSIC

Dieses Material wird im Körper vollständig abgebaut, es bildet sich neuer eigener Knochen. Langfristig verbleibt daher kein Fremdkörper im Knochen. Die Dauer des vollständigen Abbaus hängt von der Anwendung und den individuellen Gegebenheiten ab, und bewegt sich in der Regel zwischen 5 und 15 Monaten.

### GUIDOR easy-graft CRYSTAL

Dieses Material wird im Körper partiell abgebaut. Ein Anteil des Materials verbleibt integriert im neu gebildeten Knochen, um diesen zu stabilisieren.

### Was sollten Sie nach der Behandlung beachten?

Sollte Ihr Zahnarzt keine besonderen Empfehlungen aussprechen, beachten Sie bitte Folgendes:

- So lange die Betäubung anhält, sollten Sie nichts essen.
- Verzichten Sie auf körperliche Anstrengungen, um Nachblutungen zu vermeiden.
- Kühlen Sie das Operationsgebiet nach der Operation äußerlich bis zu zwei Tage mit Eisbeuteln oder Kühlakkus, um die Sie ein Handtuch gewickelt haben.
- Nehmen Sie in den ersten Tagen nach dem Eingriff nur flüssige oder besonders weiche Kost zu sich.
- Sollten bei Ihnen Fieber, starke Schwellungen, Blutungen oder starke Schmerzen auftreten, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren behandelnden Zahnarzt.
- In den ersten Tagen nach der Operation sollten Sie eine weiche Zahnbürste (z. B. GUM® Post-Operation Zahnbürste) zur Reinigung des Wundgebietes verwenden.
- Verwenden Sie antibakterielle Zahnpasten und Mundspülungen, um eine Infektion zu vermeiden (z. B. GUM® Paroex® 0,12 % Zahngel).



#### GUM® PAROEX® 0,12% CHX Zahngel

- Enthält 0,12% CHX und zusätzlich 0,05% CPC,
- Vitamin E, Aloe Vera und Provitamin B5 beruhigen und revitalisieren das Zahnfleisch.
- Zur intervallartigen 2-Wochen-Kur bei Zahnfleischproblemen und nach Operationen zur Kurzzeitpflege.

#### GUM® Post-Operation Zahnbürste

- Nach chirurgischen Operationen für eine schonende Reinigung.
- Superweich.
- Nur zum kurzzeitigen Gebrauch empfohlen.

SUNSTAR  
GUIDOR®


Hersteller: Degradable Solutions AG · Schlieren/Zürich

Verkauf: Sunstar Deutschland GmbH · Aiterfeld 1 · 79677 Schönau

Titelbild: © gooduz - Fotolia.com, Illustration: © colemtatt - istockphoto.com, © idealduplex.de

Art.-Nr. T121 12/2014

## Für ein ansteckendes Lächeln ...

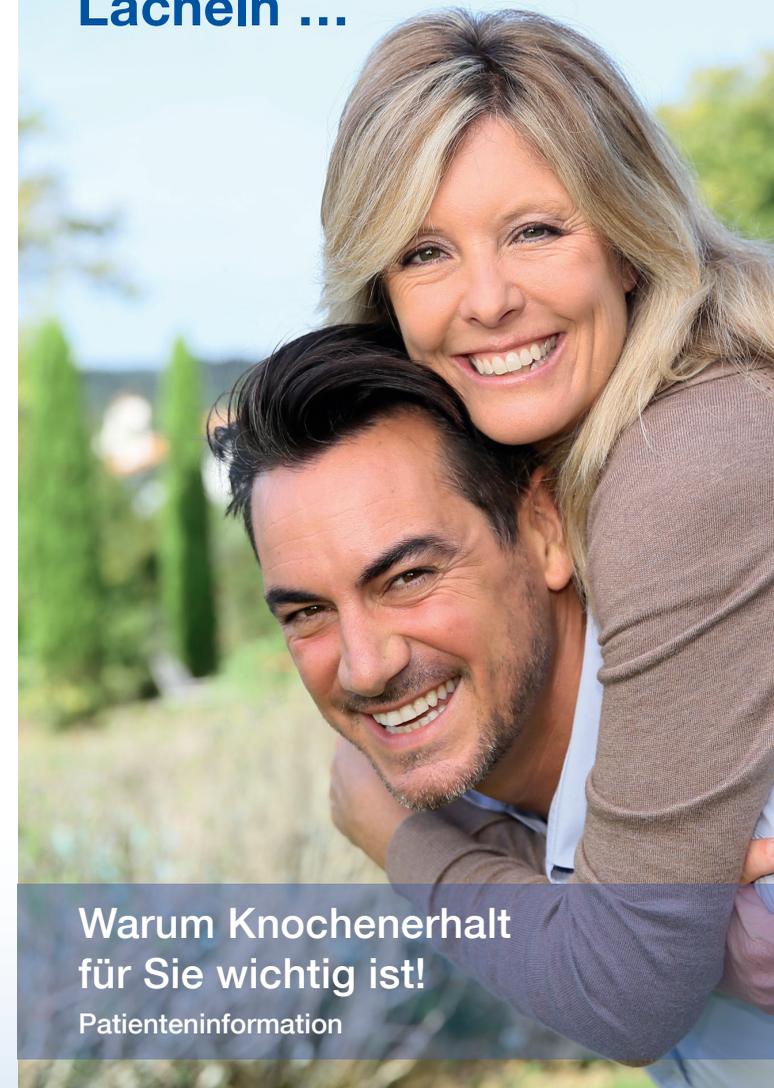

Warum Knochenerhalt für Sie wichtig ist!

Patienteninformation

SUNSTAR  
GUIDOR®